

JODOFORM prah (Iodoformium)

SASTAV

1 g praha sadrži: 99,5% tri-jodometana

OSOBINE

Jodoform prah je zelenkasto-žuti, sjajni, pločasto-kristalni, ili kristalni prašak, intezivnog karakterističnog mirisa.

Lako je rastvorljiv u etru, umereno u hloroformu, dosta teško u koncentrovanom etanolu i vrlo teško u vodi.

Kvalitet odgovara zahtevima USP 38.

Identifikacioni broj: CAS N°: 75-47-8

NAČIN UPOTREBE

Jodoform prah se koristi u stomatologiji za pripremu mekih, resorptivnih pasta, neposredno pre upotrebe.

Mešanjem jodoform praha sa rastvorima na bazi hlorfenol-kamfor-mentola dobija se WALKHOFF-ova pasta,

a mešanjem sa rastvorom Solutio Chlumsky dobija se slična, Jodoform-fenol-kamfor pasta.

NAPOMENA

Jodoform prah deluje nadražujuće. Štetan je ako se udiše, proguta, ili je u dodiru sa kožom. U slučaju da dođe u dodir sa očima, ili kožom, odmah isprati sa puno vode i zatražiti savet lekara.

Obaveštenja o opasnosti:

H 332: Štetno ako se udiše

H 312: Štetno u kontaktu sa kožom

H 302: Štetno ako se proguta

Obaveštenja o merama predostrožnosti:

P351: Ako dospe u oči: Pažljivo isprati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće. Nastaviti sa ispiranjem.

P313: Ako dođe do izlaganja, ili se sumnja da je došlo do izlaganja: Potražiti medicinski savet/mišljenje

P280: Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odeću/zaštitne naočare/zaštitu za lice

Posle upotrebe teglicu odmah zatvoriti.

Samo za profesionalnu upotrebu.

USLOVI ČUVANJA

Čuvati u dobro zatvorenoj, tamnoj teglici na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti i toplote.

ROK UPOTREBE

3 godine.

Hemikalija se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.

Sa iskorišćenim, ili neiskorišćenim proizvodom kome je istekao rok trajanja postupiti u skladu sa važećim zakonskim propisima

PAKOVANJE

Teglica sa 15g praha.



11000 Beograd, Višnjički venac 73D

P026

