

BAZOGAL® G i D**gornje i donje bazne ploče****SASTAV**

1 g mase sadrži:

šelak 466 mg

OSOBI NE

Za gornju vilicu šelak-bazis-ploča ima oblik trapeza, a za donju oblik potkovice. Bazogal G i D ploče su proizvedene od termoplastične mase, debljine 1,5 – 1,65 mm i dimenzionalno su stabilne. Materijal je čvrst i u tanjim slojevima. Boja ploča je svetloružičasta. Na sobnoj temperaturi ploče se lome pri pokušaju savijanja. Zagrevanjem postaju plastične i pogodne za modelovanje. Lako se adaptiraju na modelu, ne razmekšavaju se na temperaturi usne duplje i ne deformišu se u postupcima izrade proteze. Hlađenjem zadržavaju izmodelovani oblik.

INDIKACIJE

Izrada baze zagrižajnih šablona.

Zagrižajni šabloni sastoje se od baze i zagrižajnog bedema i koriste se za:

- određivanje međuviličnih odnosa, oblika i položaja veštačkih zubnih lukova;
- prenošenje modela u artikulator;
- postavljanje zuba.

Mogu se upotrebiti i kao individualna kašika pri uzimanju funkcionalnih otisaka.

KONTRAINDIKACIJE

Nisu poznate.

MERE OPREZA

Nema posebnih mera opreza.

DOZIRANJE I NAČIN UPOTREBE

Sva podminirana mesta na definitivnom radnom modelu treba popuniti podesnim materijalom.

Pripremljeni model potrebno je izolovati talkom, ili kratkotrajnim potapanjem u vodu. Šelak-bazis-ploča zagreva se na plamenu da postane plastična, a zatim se vlažnim prstima adaptira sve dok se ne postigne intimno naleganje na površinu modela.

Višak bazis ploče se na rubovima iseče.

NAPOMENA

Pri zagrevanju kivete sa uloženom protezom u vosku treba paziti da ista ne ostane u ključaloj vodi duže od 3 minuta. Ukoliko ostane duže vosak se istopi, a Bazogal se suviše razmekša što otežava uklanjanje sa zuba i gipsa u kiveti (lepi se).

S obzirom da je šelak-bazis-pločica krta, poželjno ju je pojačati žicom u predelu faringealnog ruba i sa lingvalne strane.

Samo za profesionalnu upotrebu.

NEŽELJENI EFEKTI

Nisu poznati.

USLOVI ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi od 10°C do 25°C.

ROK UPOTREBE

5 godina.

Medicinsko sredstvo se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.

Sa iskorišćenim, ili neiskorišćenim proizvodom kome je istekao rok trajanja postupiti u skladu sa važećim zakonskim propisima.

PAKOVANJE

Posebno

Kutija sa 12 baznih ploča Bazogal G

Kutija sa 12 baznih ploča Bazogal D

Rešenje broj: 515-02-00154-20-003

Uputstvo je odobreno: 04.03.2020.

Ovlašćeni predstavnik za Evropu:

EC	REP
----	-----

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP Hag
Holandija

Nosilac upisa: Profarm d.o.o., 11000 Beograd, Nemanjina 36, Srbija

Mesto proizvodnje: Profarm d.o.o., 11000 Beograd, Višnjički venac 73D, Srbija

Tel (+381 11) 40 80 108

E-mail: dental@profarm.rs

www.profarm.rs



