

GALEO®

Vosak za lepljenje

SASTAV

100 g štapića sadrži:

biljne smole	12,864 g
mikrokristalni vosak	29,240 g
životinjski vosak i neorganske pigmente	57,896 g

OSOBINE

Galeo se porizvodi u obliku štapića oranž boje. Ima veliku moć lepljenja. Istopljen na plamenu, čvrsto spaja razne materijale koji se koriste u zubnoj tehnici i stomatološkoj ordinaciji (gips, metali, akrilati i dr.) kada se ohladi, Galeo je krt, a sagoreva sa minimalnim ostatkom.

Galeo	Flow na 30°C ± 1°C 0% Maksimum 5%	Flow na 43°C ± 1°C 65% Maksimum 90%	Ostatak po sagorevanju 0,18% Maksimum 0,20%

Tabela prikazuje parametre kvaliteta za Galeo.

PRIMENA

Galeo se koristi za: lepljenje delova pri sastavljanju gipsanog modela, lepljenje metalnih krunica i tela mosta pri ulaganju za lotovanje, lepljenje polomljenih akrilatnih proteza pri reparaturi, lepljenje polomljenih modela i za ostale brojne potrebe kako u zubnoj tehnici, tako i u stomatološkoj ordinaciji.

NAČIN UPOTREBE

Površine koje se lepe moraju biti suve i obezmašćene. Galeo, pre nanošenja nožićem za modelovanje, dobro zagrejemo na plamenu i nakapljemo na delove koje treba lepiti.

NAPOMENA

Samo za profesionalnu upotrebu.

USLOVI ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 25°C.

ROK UPOTREBE

3 godine.

Proizvod se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.

Sa iskorišćenim, ili neiskorišćenim proizvodom kome je istekao rok trajanja postupiti u skladu sa važećim zakonskim propisima.

PAKOVANJE

6 štapića.



11000 Beograd, Višnjički venac 73D