

KUPROVENT® N
termoplastična masa za otiske

SASTAV

1 g mase sadrži:	
prirodne smole (Copal)	196,94 mg
Resenol 120	226,39 mg

OSOBINE

Kuprovent N se proizvodi u obliku štapića metalizirano smeđe boje. Spada u grupu kompozicionih termoplastičnih otisnih materijala tipa I, koji omekšavaju na temperaturi od 55 do 60°C. Plastična faza omekšalih štapića zahvaljujući metalnim česticama dovoljno je duga pri temperaturi od 45 do 50°C, što obezbeđuje lak i komforan rad. Kuprovent N otisci su homogeni sa glatkim površinama.

INDIKACIJE

Kuprovent N se koristi za:

- formiranje ventilnog ruba pri uzimanju funkcionalnog otiska bezubih vilica;
- korigovanje individualnih kašika.

KONTRAINDIKACIJE

Nisu poznate.

MERE OPREZA

Nema posebnih mera opreza.

DOZIRANJE I NAČIN UPOTREBE

Kuprovent N štapiće zagrevati u vodenom kupatilu na temperaturi oko 60°C. Zagrejanim i omekšanim Kuprovent N štapićima uzeti otisak prema postavljenoj indikaciji, ili planu terapije. Otiske uzete Kuprovent N termoplastičnom masom čuvati na sobnoj temperaturi do definitivnog uzimanja otiska.

NAPOMENA

Kuprovent N ne treba pregrevati na otvorenom plamenu. Ovakav postupak dovodi do neravnomernog zagrevanja i dezintegracije mase koja tada gubi svojstva za dobar otisak. Posle upotrebe kutiju odmah zatvoriti. Samo za profesionalnu upotrebu.

NEŽELJENI EFEKTI

Nisu poznati.

USLOVI ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi od 10 do 25°C.

ROK UPOTREBE

5 godina.

Medicinsko sredstvo se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.


Sa iskorišćenim, ili neiskorišćenim proizvodom kome je istekao rok trajanja, postupiti u skladu sa važećim zakonskim propisima.

PAKOVANJE

Kutija sa 18 štapića.

Rešenje broj: 515-02-04387-19-003

Uputstvo je odobreno: 20.01.2020.

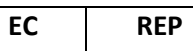

Ovlašćeni predstavnik za Evropu:

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP Hag
Holandija

Nosilac upisa: Profarm d.o.o., 11000 Beograd, Nemanjina 36, Srbija

Mesto proizvodnje: Profarm d.o.o., 11000 Beograd, Višnjički venac 73D, Srbija

Tel (+381 11) 40 80 108

E-mail: dental@profarm.rs

www.profarm.rs

