

RETRARGIN® rastvor
rastvor za retrakciju gingive

SASTAV

1 ml rastvora sadrži:	
aluminijum hlorid heksahidrata	250,00 mg
8-hidroksihinolin sulfata	1,00 mg

OSOBINE

Aktivna komponenta Retrargin rastvora je hipertonični rastvor aluminijum hlorida koji deluje adstringentno . Konac nakvašen rastvorom i obavijen oko brušenih zuba za kratko vreme dovodi do otvaranja gingivalnog sulkusa i retrakcije gingive.

INDIKACIJE

Retrargin rastvor se koristi da se nakvasi konac za brzu i privremenu retrakciju gingivalnog sulkusa i dobijanje suvog i preglednog radnog polja:

- pre uzimanja drugog, korekcionog, otiska elastomerima;
- pri obradi ivica kaviteta ispod gingive.

KONTRAINDIKACIJE

Nisu poznate.

MERE OPREZA

Voditi računa da ne dođe do kontakta sa kožom. Koristiti zaštitne rukavice.

DOZIRANJE I NAČIN UPOTREBE

Odgovarajuća dužina konca se nakvasi rastvorom i pažljivo utisne u gingivalni sulkus oko brušenih zuba idući od oralne preko obe aproksimalne na vestibularnu stranu. Nakvašeni konac ne sme dugo da stoji u sulkusu. Ako je potrebno uzimanje otisaka za više brušenih zuba prvo se utiskuje konac, a zatim se pomoću vrha pincete slobodan kraj konca kvasi rastvorom.

NAPOMENA

Posle upotrebe bočicu odmah zatvoriti.
Samo za profesionalnu upotrebu.

NEŽELJENI EFEKTI

Nisu poznati.

USLOVI ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi od 15°C do 30°C.

ROK UPOTREBE

3 godine.

Medicinsko sredstvo se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju. Sa iskorišćenim ili neiskorišćenim proizvodom kome je istekao rok trajanja postupiti u skladu sa važećim zakonskim propisima.

PAKOVANJE

Bočica sa 20 ml rastvora

Rešenje broj: 515-02-04387-19-003

Uputstvo je odobreno: 20.01.2020.

Ovlašćeni predstavnik za Evropu:

EC	REP
----	-----

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20

2514 AP Hag
Holandija

Nosilac upisa: Profarm d.o.o., 11000 Beograd, Nemanjina 36, Srbija

Mesto proizvodnje: Profarm d.o.o., 11000 Beograd, Višnjički venac 73D, Srbija



Tel (+381 11) 40 80 108

E-mail: dental@profarm.rs

www.profarm.rs