



## **STOMATOLOŠKE PAPIRNE ROLNE**

**Nesterilne**

### **SASTAV**

Celuloza 100%

### **KARAKTERISTIKE**

Stomatološke papirne rolne su papirne rolne bele boje, u obliku cilindara, koje se u stomatologiji koriste za upijanje pljuvačke u različitim stomatološkim procedurama. Papirne rolne nisu sterilne, ali su mikrobiološki ispitane.

### **NAČIN UPOTREBE**

Stomatološke papirne rolne se koriste u toku stomatoloških intervencija za odvajanje zuba, ili grupe zuba od oralnog tkiva (jezika, obraza) u cilju sprečavanja vlaženja radnog polja, olakšavanja pristupa i poboljšanja vidljivosti radnog polja.

Po završetku korišćenja, pre odstranjivanja iz usne šupljine, papirnu rolnu dodatno natopiti vodom, kako bi se izbeglo njeno lepljenje za sluzokožu usne duplje.

### **NAPOMENA**

Papirne rolne se ne smeju aplikovati direktno na ranu.

### **USLOVI ČUVANJA**

Čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi od 10 do 25°C na suvom i čistom mestu, zaštićenom od direktnog delovanja sunčeve svetlost.

### **ROK UPOTREBE**

5 godina.

Medicinsko sredstvo se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.

Sa iskorišćenim, ili neiskorišćenim proizvodom kome je istekao rok trajanja, postupiti u skladu sa važećim zakonskim propisima.

## PAKOVANJE

Kesa sa 400 papirnih rolni.

Rešenje broj: 515-02-00255-20-004

Uputstvo je odobreno: 06.03.2020.

Ovlašćeni predstavnik za Evropu:

EC	REP
----	-----

**EMERGO EUROPE**

**Prinsessegracht 20**

**2514 AP Hag**

**Holandija**

Nosilac upisa: Profarm d.o.o., 11000 Beograd, Nemanjina 36, Srbija

Mesto proizvodnje: Profarm d.o.o., 11000 Beograd, Višnjički venac 73D, Srbija



Tel (+381 11) 40 80 108

E-mail: dental@profarm.rs

[www.profarm.rs](http://www.profarm.rs)