



## **SALIGAL<sup>®</sup>**

**stomatološke sisaljke za aspiraciju pljuvačke**

### **SASTAV**

Cevčica: polivinil-hlorid	70,00%
ftalati	25,40%
Kapica: polietilen	

### **OSOBINE**

Saligal, stomatološke sisaljke, su proizvedene od mekog, providno PVC materijala, ojačanog savitljivom žicom. Fleksibilne su, netoksične, bez lateksa.

### **NAČIN UPOTREBE**

Saligal sisaljku treba blago saviti na onom kraju koji je pokriven kpicom. Drugi, slobodan kraj sisaljke, povezati sa odvodnom cevi aspiratora. Deo sisaljke sa kpicom postaviti u usta pacijenta.

### **NAPOMENA**

Posle svake jednokratne upotrebe, Saligal sisaljku obavezno baciti.  
Samo za profesionalnu upotrebu.

### **USLOVI ČUVANJA**

Čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi od 15°C do 30°C.

### **ROK UPOTREBE**

5 godina.

Medicinsko sredstvo se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.

Sa iskorišćenim ili neiskorišćenim proizvodom kome je istekao rok trajanja postupiti u skladu sa važećim zakonskim propisima.

### **PAKOVANJE**

Kesa sa 100 komada sisaljki

Dostupne bezbojne, u zelenoj, crvenoj i plavoj boji.

Rešenje broj: 515-02-00255-20-004

Uputstvo je odobreno: 06.03.2020.

Ovlašćeni predstavnik za Evropu:



**EMERGO EUROPE**  
**Prinsessegracht 20**  
**2514 AP Hag**  
**Holandija**



Nosilac upisa: Profarm d.o.o., 11000 Beograd, Nemanjina 36, Srbija  
Mesto proizvodnje: Profarm d.o.o., 11000 Beograd, Višnjički venac 73D, Srbija

Tel (+381 11) 40 80 108  
e-mail: [dental@profarm.rs](mailto:dental@profarm.rs)  
[www.profarm.rs](http://www.profarm.rs)

