

VANTAL[®] pasta

**pasta za uklanjanje mekih
naslaga i poliranje zuba**

SASTAV

1 g paste sadrži:

kalcijum karbonata	163 mg
lapis pumicisa	444 mg
aromu	2 mg

OSOBINE

Vantal pasta je pasta ružičaste boje, meke konzistencije sa homogeno raspoređenim abrazivnim česticama.

Efikasno uklanja meke naslage sa zuba (dentalnu pelikulu, dentalni plak, materiju albu, duvanske i ostale naslage).

Omogućava poliranje zuba, a pri tom ne oštećuje gleđ.

Očišćeni i polirani zubi ostaju glatki, čime se smanjuje akumulacija dentalnog plaka.

Vantal pasta je osvežavajućeg mirisa.

INDIKACIJE

Uklanjanje mekih naslaga:

- u prevenciji gingivitisa i parodontopatija;
- u terapiji parodontopatija;
- posle lečenja parodontopatija;
- u prevenciji karijesa zuba;
- pre primene kompozitnih materijala.

KONTRAINDIKACIJE

Nisu poznate.

MERE OPREZA

Nema posebnih mera opreza.

DOZIRANJE I NAČIN UPOTREBE

Pre primene Vantal paste, potrebno je potpuno ukloniti kamenac sa zuba.

Iz tube istisnuti odgovarajuću količinu paste i pogodnim instrumentom naneti na površine zuba.

Rotirajućim instrumentima (četkicama i gumicama), uz mali broj obrtaja, čistiti i polirati zube uz stalno korišćenje Vantal paste.

Pri radu treba paziti da se ne ošteti tkivo gingive.

NAPOMENA

Posle upotrebe tubu odmah zatvoriti.
Samo za profesionalnu upotrebu.

NEŽELJENI EFEKTI

Nisu poznati.

USLOVI ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi od 15 do 30°C.

ROK UPOTREBE

3 godine.

Medicinsko sredstvo se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.
Sa iskorišćenim ili neiskorišćenim proizvodom kome je istekao rok trajanja postupiti u skladu sa važećim zakonskim propisima.

PAKOVANJE

Tuba sa 40 g paste

Rešenje broj: 515-02-04387-19-003
Uputstvo je odobreno: 20.01.2020.

Ovlašćeni predstavnik za Evropu:



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP Hag
Holandija



Nosilac upisa: Profarm d.o.o., 11000 Beograd, Nemanjina 36, Srbija
Mesto proizvodnje: Profarm d.o.o., 11000 Beograd, Višnjički venac 73D, Srbija

Tel (+381 11) 40 80 108
e-mail: dental@profarm.rs
www.profarm.rs

