

VOMOGAL® S**dentalni vosak za modelovanje****SASTAV**

Parafin Tip N 5803
Parafin, beli, meki
Beli vosak
Karnauba vosak
Beli cerezin (TT 80-90 °C)
Balzam smola
Boja Ponceau 4R

OSOBINE

Vomogal S je složenog hemijskog sastava, koji čini kombinacija prirodnih i veštačkih voskova. Sve sirovine koje ulaze u sastav su standardnog kvaliteta. Vomogal S je proizveden u obliku ploče ružičaste boje koja se ne ljušta, ne lepi i ne prebojava gips. Vomogal S je neutralnog mirisa i ukusa. Njime se lako i jednostavno radi na različitim sobnim temperaturama.

Plastična deformacija (Flow) Vomogala S je:

na 23°C	najviše 1,0%
na 37°C	5% – 90%

INDIKACIJE

Vomogal S ima široku primenu u stomatologiji i zubnoj tehnici. Upotrebljava se za modelovanje proteznih ploča, za izradu nagriznih grebena, za uzimanje zagrižaja i ostale potrebe u zubnoj tehnici i stomatološkoj ambulanti.

KONTRAINDIKACIJE

Nisu poznate.

MERE OPREZA

Nema posebnih mera opreza.

DOZIRANJE I NAČIN UPOTREBE

Potrebnu količinu ploče Vomogala S razmekšati nad plamenom i koristiti prema planiranoj indikaciji.

NAPOMENA

Posle upotrebe kutiju odmah zatvoriti.
Samo za profesionalnu upotrebu.

NEŽELJENI EFEKTI

Nisu poznati.

USLOVI ČUVANJA

Čuvati na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti.

ROK UPOTREBE

3 godine.

Medicinsko sredstvo se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.

Sa iskorišćenim ili neiskorišćenim proizvodom kome je istekao rok trajanja postupiti u skladu sa važećim zakonskim propisima.

PAKOVANJE

Kutija sa 400 g Vomogal S ploča

Rešenje broj: 515-02-04387-19-003

Uputstvo je odobreno: 20.01.2020.

Ovlašćeni predstavnik za Evropu:

EC	REP
----	-----

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP Hag
Holandija

Nosilac upisa: Profarm d.o.o., 11000 Beograd, Nemanjina 36, Srbija

Mesto proizvodnje: Profarm d.o.o., 11000 Beograd, Višnjički venac 73D, Srbija

Tel (+381 11) 40 80 108

E-mail: dental@profarm.rs

www.profarm.rs

